

VAGHEGGI
PHYTOSMETICI



VGH PHYTOTECH FACE LAB



Best Medical Beauty Equipment Brand

VAGHEGGI
PHYTOSMETICI

VGH **FACE LAB**

*TECHNOLOGIE
INTÉGRÉE POUR LES
TRAITEMENTS ANTI-
ÂGE*



VGH FACE LAB (4 technologies pour le visage)

UNE SYNERGIE PARFAITE POUR LUTTER CONTRE LE VIEILLISSEMENT DE LA PEAU

Microdermabrasion au diamant
RF multipolaire
RF fractionnée
Ultrasons 3 MHz

LE SYSTÈME INTÉGRÉ IDÉAL qui traite la peau en surface et en profondeur grâce à un protocole soigneusement étudié qui intègre également les produits VAGHEGGI et délivre leurs précieux principes actifs beaucoup plus profondément et en plus grande quantité dans la peau de vos clients/es.

VGH FACE LAB, avec ses **4 technologies** est la méthode la plus innovante pour traiter de manière personnalisée et efficace les différents signes du vieillissement :

Épaississement
Ternissement
Rides
Perte de définition des contours



FACE LAB - FONCTIONS

LA SYNERGIE PARFAITE POUR CONTRER LE VIEILLISSEMENT DE LA PEAU

L'exfoliation douce et complète par la technologie de microdermabrasion au diamant améliore la circulation sanguine et la production naturelle de collagène, tandis que les traitements par RF multipolaire, RF fractionnée et ultrasons 3MHz donnent des résultats anti-âge efficaces, en aidant à hydrater, régénérer et restaurer l'élasticité pour un effet lifting et une splendide apparence de jeunesse.

LES 4 TECHNOLOGIES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES EGALEMENT SÉPAREMENT

Étape 1

Microdermabrasion
au diamant



Étape 2

RF
multipolaire



Étape 3

RF
fractionnée



Étape 4

Ultrasons
3 MHz



VAGHEGGI
PHYTOSMETICI



Un accord parfait avec nos 4 lignes
anti-âge :

- WHITE MOON
- DELAY INFINITY
- INTENSE
- 75.15 (active touch-eyes touch)



1° ÉTAPE : MICRODERMOABRASION AU DIAMANT

Cette nouvelle méthode **sans contre-indications** est facilement réalisable par l'opérateur et n'est **ni invasive ni traumatisante**. Cette méthodologie est reconnue comme efficace par les médecins et les résultats obtenus en font un système nettement évolué par rapport à l'exfoliation mécanique traditionnelle.

Grâce aux têtes diamantées innovantes, l'action de la pièce à main permet un travail uniforme et garantit l'**élimination de la couche superficielle** de l'épiderme, favorisant l'**augmentation du renouvellement cellulaire du tissu traité (collagène)**.

Elle améliore également la perméabilité de la peau ce qui favorise une plus grande absorption des produits cosmétiques.

4 têtes différentes disponibles :

Blanche : grain fin

Bleu : grain moyen

Rouge : gros grain

Caoutchouc : pour le massage

L'action du vide redensifie la peau et la stimule en profondeur, rendant les tissus plus réceptifs aux produits spécifiques VAGHEGGI



1° ÉTAPE : MICRODERMOABRASION AU DIAMANT

Choisissez l'un des 4 accessoires pour le traitement, placez-le sur la pièce à main métallique en exerçant une simple pression.

Commencez le traitement, la peau doit être sèche pour permettre à la pièce à main une meilleure élimination des cellules mortes.

La pièce à main est équipée d'un petit trou latéral, il doit être fermé avec le doigt pour décompresser l'air et générer un léger effet de vide, cette action favorisera la stimulation de la microcirculation pour une meilleure absorption des cosmétiques appliqués dans les phases suivantes, améliorera le teint et favorisera l'aspiration des résidus épidermiques.

HOLE



Durée : 2 passages par zone
Puissance de base : 70




Il est conseillé d'acheter plusieurs kits de tête car ils sont destinés à un seul client et NE PEUVENT pour des raisons d'hygiène, être utilisés sur différents clients.
La tête de diamant a une durée de 4/6 traitements (sur le même client)

2° ÉTAPE : RADIOFRÉQUENCE MULTIPOLAIRE

- La radiofréquence multipolaire agit par le biais d'une augmentation contrôlée de la température sous-cutanée qui provoque la dénaturation des protéines de collagène, donnant lieu à une réorganisation des lignes de tension de la peau.

Elle active également les fibroblastes, augmentant ainsi la production de collagène et d'élastine au fil du temps.

- Les 4 émetteurs permettent d'atteindre une profondeur supérieure à celle de la pièce à main bipolaire.
 - Durée 20-30 min
 - Puissance de base 40
 - Portée 40-60
 - Contour des yeux 40

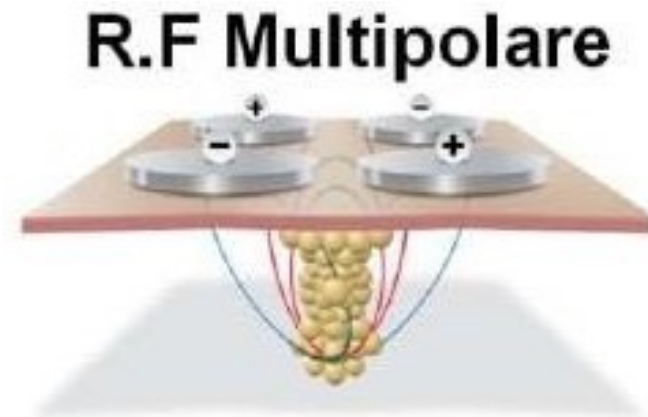

2° ÉTAPE : RADIOFRÉQUENCE MULTIPOLAIRE

Le **MULTIPOLAR** permet un travail **précis** et **détaillé** des zones les plus touchées par le problème. Grâce à sa pénétration plus profonde, il **liffe** et **raffermit** les tissus.

NOUVELLE GÉNÉRATION

Il s'agit d'un moyen d'atteindre le résultat de l'analyse dans un endroit bien précis du système à 4 niveaux. Dans ces conditions, les températures élevées peuvent être réexaminées, tant au niveau de la source (40°C) qu'à l'intérieur (43°C jusqu'à 2°C).



PIÈCE À MAIN RADIOFRÉQUENCE
MULTIPOLAIRE

2° ÉTAPE : RADIOFRÉQUENCE MULTIPOLAIRE



Passez toujours l'autre main sur la peau couverte par la pièce à main.

Pendant l'utilisation, la pièce à main doit rester en mouvement pour éviter les brûlures désagréables dues à la chaleur émise par la radiofréquence.

Tenez toujours la pièce à main perpendiculairement à la peau, en la déplaçant lentement sans trop de pression et en vérifiant qu'il y a toujours une épaisse couche de produit entre la tête de la pièce à main et la peau. Mouvement lent et circulaire.

La puissance doit être réglée en fonction de la tolérance du client.



NE PAS DÉPASSER UNE DURÉE TOTALE DE TRAITEMENT DE 30 MINUTES.

	TOTAL TIME	Total duration time of treatment
Tempo Totale 30:00		
Potenza - % 00	POWER -%	Énergie livrée en pourcentage
Azione 3,00	ACTION	Durée en secondes de l'énergie émise (RF)
Pausa 0,00	PAUSE	Énergie mise en pause en secondes (RF)
←	BACK	Permet de revenir à l'écran précédent
↓	MEMORY CARD	Mémorise les données sur la carte
+ -	+ AND -	Pour augmenter et diminuer les paramètres
⏏	STOP	Arrêter ou interrompre un traitement
▶	START	Pour commencer le traitement

L'action (temps) est une mesure de sécurité et ce paramètre ne doit pas être modifié. S'il est abaissé, la chaleur est émise plus rapidement et le client ressent donc plus de chaleur.

La pause est une autre mesure de sécurité et ne doit être utilisée qu'avec les peaux sensibles/couperose pour créer des "pauses" dans l'émission de chaleur afin que le client ne ressente pas trop de chaleur.

2° ÉTAPE : RADIOFRÉQUENCE MULTIPOLAIRE

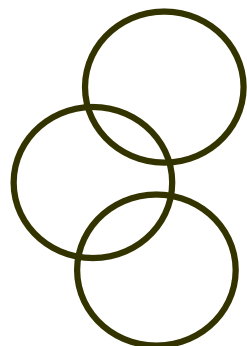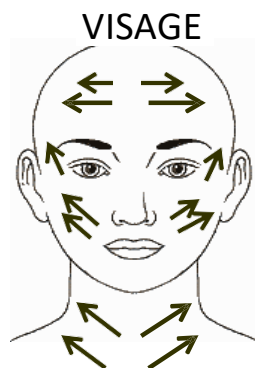

Mouvements circulaires, en suivant les traits musculaires, tant sur le visage que sur le corps. Pour un résultat efficace, il est recommandé de travailler d'abord de manière uniforme sur toute la zone à traiter, puis de se concentrer davantage sur les parties les plus touchées.

POUR CHAQUE PROTOCOLE IL EST IDÉAL D'UTILISER LA TECHNIQUE DE MASSAGE DU VISAGE ECHINACEA FACE MASSAGE TECH

CONSEILS : Il est préférable de bien travailler sur une seule zone pendant plus longtemps plutôt que sur plusieurs zones pendant moins longtemps.

PIÈCE À MAIN MULTIPOLAIRE

Gamme de puissance recommandée entre 50 et 65*.

*La sensation de chaleur est cependant subjective et nous recommandons donc de toujours commencer par un niveau plus bas (**par exemple 45-50**) et d'augmenter ensuite la puissance pendant le traitement.


*Conseillez à la cliente de signaler toute sensation de chaleur excessive à l'esthéticienne, qui pourra alors réduire les niveaux de puissance.

CONTRE-INDICATIONS (voir le manuel de l'utilisateur)
N'oubliez pas de faire signer au client le formulaire de consentement éclairé.

3° ÉTAPE RADIOFRÉQUENCE FRACTIONNÉE

- Le FRF est une technique innovante, moins invasive que les lasers chirurgicaux et le microneedling, qui réduit visiblement les rides, repulpe et redensifie les contours du visage.
- Pendant le traitement, les pointes (37 ou 12 points d'émission) de la pièce à main créent des micro-éclats d'électromagnétisme qui assurent un traitement capillaire et, selon la puissance, atteignent la peau en profondeur, provoquant une augmentation de la température du derme et contribuant ainsi à l'oxygénation et à la régénération des tissus.
- **Cette fonction doit être utilisée après un traitement de stimulation par RF multipolaire**

Durée 5-10 min (2 applications per zone)
puissance de base 70

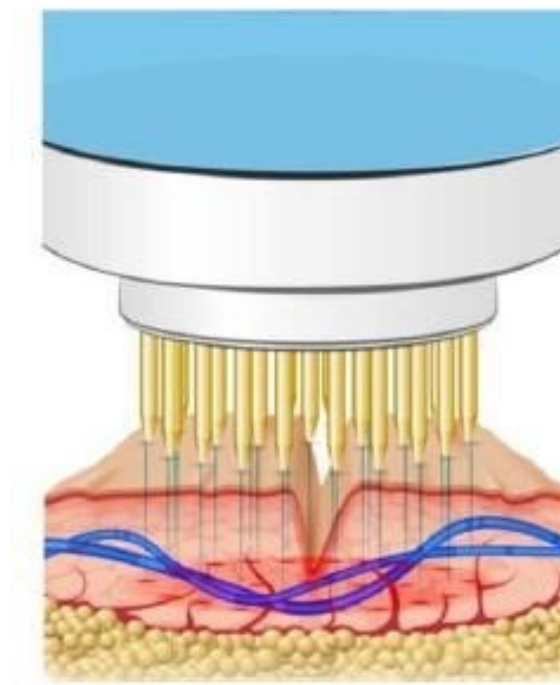

3° ÉTAPE RADIOFRÉQUENCE FRACTIONNÉE




Positionnez la pièce à main sur la zone à traiter et suivez la couleur de la lumière :

LUMIÈRE VERTE : ÉNERGIE PAUSÉE

LUMIÈRE ORANGE : ÉNERGIE ÉMISE

AVANT DE PRATIQUER LA RADIOFRÉQUENCE FRACTIONNÉE, IL FAUT TOUJOURS PRÉPARER LA PEAU AVEC LA RADIOFRÉQUENCE MULTIPOLAIRE

4° ÉTAPE 3MHz ULTRASOUND

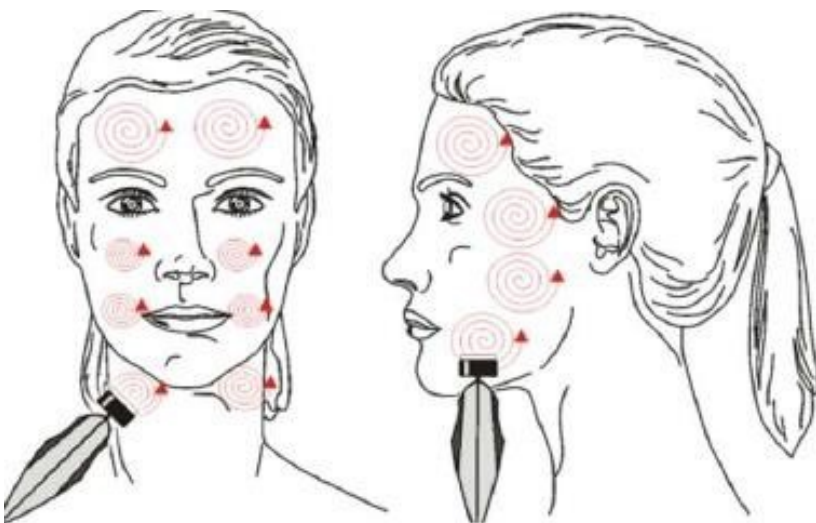

- La technologie des ultrasons 3MHz favorise une plus grande **perméabilité** cellulaire et une meilleure circulation sanguine locale permettant une diffusion optimale des principes actifs des produits spécifiques, avec d'excellents résultats sur tous les types de peau.
- Il favorise le **métabolisme** et le **drainage**
- Il s'agit d'un **traitement final** parfait car il favorise la diffusion des **produits utilisés** pendant la séance de beauté.

Durée maximale de 10 minutes à la puissance 65

AVANTAGES TECHNIQUES

- TECHNOLOGIE COMPLÈTE DE SOIN DU VISAGE
- UNE APPROCHE AVANT-GARDISTE ET EFFICACE QUI RÉPOND AUX BESOINS DES CLIENTS
- PERSONALISATION MAXIMALE DU PROGRAMME (Advance1 ou Advance2)
- ÉCRAN TACTILE
- UN LOGICIEL CONVIVIAL
- COMPLET (il s'intègre parfaitement à tous les protocoles cosmétiques de VAGHEGGI Age Care)



LINE ESSENTIELS & FACE LAB/PLUS

	REHYDRA	EMOZIONI PLUS	BALANCE
Étape 1	BRUSHING UTILISER : LAIT NETTOYANT HYDRATANT	BRUSHING UTILISER : CRÈME NETTOYANTE	BRUSHING UTILISER : GEL EXFOLIANT
Étape 2	LOTION HYDRATANTE ET TONIFIANTE	BRUME LENITIVE	SPATULE À ULTRASONS : 25KHz UTILISER : GEL EXFOLIANT & LOTION TONIQUE HYDRATANTE REHYDRA
Étape 3	SPATULE À ULTRASONS : 25KHz UTILISER : GEL EXFOLIANT AU BAMBOU & REHYDRA LOTION HYDRATANTE ET TONIFIANTE	SPATULE À ULTRASONS : 25KHz UTILISER : EXFOLIANT ENZYMATIQUE & BRUME LENITIVE	RADIOFRÉQUENCE BIPOLAIRE (30') UTILISATION : ECHINACEA FACE MASSAGE TECH
Étape 4	RADIOFRÉQUENCE BIPOLAIRE (30') UTILISATION : ECHINACEA FACE MASSAGE TECH	RADIOFRÉQUENCE BIPOLAIRE (30') UTILISATION : ECHINACEA FACE MASSAGE TECH	ELECTOPORATOR USE: VIALS CONCENTRATE & 2.5ML OF REHYDRA LOTION HYDRATANTE ET TONIFIANTE
Étape 5	ELECTOPORATOR UTILISER : INTENSIVE MOISTURISING VIAL & 2.5ML OF REHYDRA LOTION HYDRATANTE ET TONIFIANTE	ELECTOPORATOR UTILISER : FACE CONCENTRATE & 2.5ML OF REHYDRA LOTION HYDRATANTE ET TONIFIANTE	SPONGY MASK
Étape 6	MASQUE HYDRATANT	TUBE DE MASSAGE DU VISAGE	CONCEALER GEL
Étape 7	CRÈME POUR LE CONTOUR DES YEUX	MASQUE ANTI-STRESS POUR LE VISAGE	CRÈME MATIFYNG
Étape 8	CRÈME DE JOUR HYDRATANTE	CRÈME COCOONING	

AGE PREVENTION & FACE LAB/PLUS

	WHITE MOON	LIME
Étape 1	BRUSHING UTILISER : CLEANSING TONER	BRUSHING UTILISER : VITAMIN C MICELLAR CLEANSER
Étape 2	ULTRASOUND SPATULA 25 KHz UTILISER : FIZZY MASK & REHYDRA MOISTURISING TONING LOTION	ELECTOPORATOR UTILISER : ZINC+ORANGE MINERALISER & 2.5ML OF REHYDRA MOISTURISING TONING LOTION
Étape 3	BIPOLAR RADIOFREQUENCY (30') UTILISER : ECHINACEA FACE MASSAGE TECH	ULTRASOUND SPATULA 25 KHz UTILISER : BAMBOO EXFOLIATING GEL & ZINC+ORANGE
Étape 4	ELECTOPORATOR UTILISER : SMOOTHING CONCENTRATED DROPS & 2.5ML OF REHYDRA MOISTURISING TONING LOTION	BIPOLAR RADIOFREQUENCY (30') UTILISER : ECHINACEA FACE MASSAGE TECH
Étape 5	BRIGHTENING MINERAL MASK	VITAMIN C FACE MASSAGE
Étape 6	PROTECTIVE BRIGHTENING EMULSION	VITAMIN C FACE MASK
		VITAMIN C FLUID OR VITAMIN C CREAM

AGE CARE LINES & FACE LAB/PLUS

	DELAY INFINITY	INTENSE	75.15
Etape 1	BRUSHING UTILISER : CLEANSING MILK	BRUSHING UTILISER : COMPLETE CLEANSER FACE & EYES	BRUSHING UTILISER : CLEANSING CREAM
Etape 2	TONING LOTION	ULTRASOUND SPATULA 25 KHz UTILISER : EXFOLIANTING GEL & REHYDRA MOISTURISING LOTION	ELECTROPORATOR UTILISER : PRECIOUS TONER
Etape 3	ULTRASOUND SPATULA 25 KHz UTILISER : BAMBOO EXFOLIATING GEL & TONING LOTION	BIPOLAR RADIOFREQUENCY UTILISER : ECHINACEA FACE MASSAGE TECH	ULTRASOUND SPATULA 25KHz UTILISER : FACE SCRUB & PRECIOUS TONER
Etape 4	BIPOLAR RADIOFREQUENCY UTILISER : ECHINACEA FACE MASSAGE TECH	DEEP FACIAL MASSAGE	BIPOLAR RADIOFREQUENCY UTILISER : ECHINACEA FACE MASSAGE TECH
Etape 5	FACE MASSAGE VIAL	ELECTROPORATOR UTILISER : SCHOCK CONCENTRATE & REHYDRA MOISTURISING LOTION	GEL LIKE MASK
Etape 6	FACE MASK	SENSITIVE ZONE MASK T ZONE MASK	INTENSIVE EYE CONTOUR
Etape 7	ELECTOPORATOR UTILISER : FLAWLESS FACE VIAL & 2.5ML OF TONING LOTION		SMOOTHING DAY CREAM
Etape 8	EYE AND LIP CONTOUR CREAM		
Etape 9	DAY CREAM		

PROTOCOL INTENSIF POUR COMBATTRE LES VERGETURES

	VGH PHYTOTECH	VGH PRODUCTS	QTE	DOSE PAR TRAITEMENT	UTILISATION
Smoothing		Fuoco Ultra Smoothing Gel	250 ml	En fonction de la zone à traiter	Utilisez le pinceau pour appliquer le gel sur les zones concernées. Laissez le produit enveloppé dans un papier plastique pendant 10 minutes (lors de la première séance, évaluez la peau du client et réduisez le temps si nécessaire). Retirez le produit à l'aide de gants humides
Tech Stimulation	VGH FACE LAB Diamond Microdermabrasion Multipolar Radio Frequency Fractional Radio Frequency	Sikelia Massage Cream	500 ml	En fonction de la zone à traiter	Suivre le protocole du VGH FACE LAB
Phase active		Sikelia Intensive stretch marks concentrate	1 phial	10 ml	Appliquer la fiole de protocole sur les zones en question et masser jusqu'à absorption
Fin du traitement	VGH FACE LAB Ultrasound 3 MHz	Sikelia Massage Cream	500 ml	En fonction de la zone à traiter	Appliquez le produit sur les zones traitées et poursuivez le traitement par ultrasons jusqu'à absorption.

Durée du traitement : 50 minutes maximum par zone

www.tuv.com
ID 9105082302



ISO 9001:2015

Rappresenta la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, riconosciuta a livello internazionale, garantisce che le apparecchiature rispettino il sistema di gestione previsto dalla norma per la progettazione, la produzione, la vendita, lo sviluppo e la ricerca.

www.tuv.com
ID 9105082302



EN ISO 13485:2012

La certificazione relativa al Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici, è uno standard di riferimento di Qualità nell'ambito delle procedure regolamentari che disciplinano la progettazione, la produzione e l'immissione in commercio dei Dispositivi Medici.

www.tuv.com
ID 9105082302



OHSAS 18001:2007

Relativa allo standard per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

VAGHEGGI
PHYTocosMETICI



VGH FACE LAB